

Syrgasflaska LIV och sug på akutvagn

Kontroll

Kontrollera att manometer/tryckmätare (1) visar på det gröna området. Om inte – byt flaskan!
 Syrgasslang ska vara ansluten till slangnippel (2) och en pocketmask ska vara ansluten till slangarna. Öppna huvudkranen (3), vrid moturs till "OPEN". Se till att locket (4) på sugpåsen är fastsatt på kanistern och att slangarna är rätt kopplade. Starta ejektorsugen genom att lyfta reglaget (5) och kontrollera att sugpåsen expanderar genom att vrida den svarta ratten (7). Blockera sug(patient)slangen och ställ in sugtrycket (8) på -0,10 bar/-10 kPa (startläge). Stäng av sugen genom att trycka ned reglaget. Stäng huvudkranen (3) vrid medurs till "CLOSE". Släpp ut trycket i systemet genom att vrida på O2 flödesväljarens ratt (6) och när gasflödet upphört, vrid O2 flödesväljarens ratt till läge 0.

Syrgasbehandling:


- Öppna huvudkranen (3), vrid moturs till "OPEN".
- Ställ in ordinerat flöde genom att vrida på O2 flödesväljarens ratt (6).

Sugbehandling:

- Öppna huvudkranen (3), vrid moturs till "OPEN".
- Starta ejektorsugen genom att lyfta reglaget (5)
- Startläge -0,10 bar/-10 kPa rekommenderas. Sugtrycket (8) regleras genom att vrida den svarta ratten (7).
- Stäng av sugen när den inte används genom att trycka ned reglaget.

Efter varje användning:

- Anslut en ny syrgasslang och en ren samt komplett pocketmask.
- Anslut rena sugtillbehör (engångs).
- **UTFÖR KONTROLL**, se ovan.

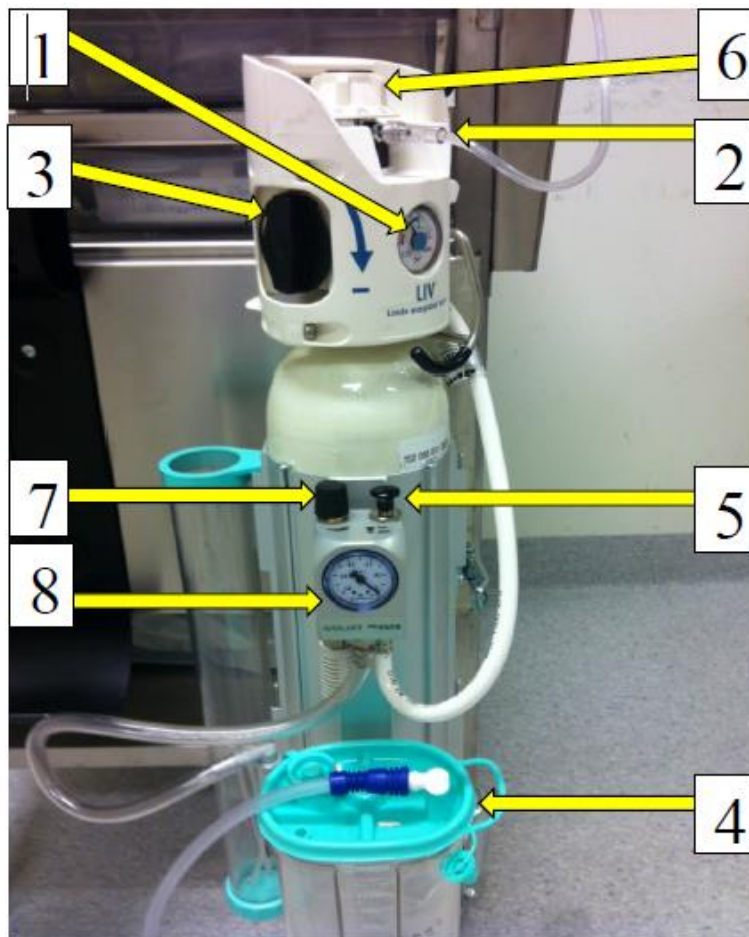

För beställning av syrgasflaska – ring Transport ordcentral 190 00, välj #4 Gastransporter